



V1 Oct 2023

Cranial Access Kit

Mode d'emploi

Informations importantes

À lire avant utilisation

STERILE EO

Indications

Le kit d'accès crânien Delta est nécessaire lorsqu'une craniotomie est requise pour les procédures de drainage de la PIC ou du LCR.

Événements indésirables

Des saignements peuvent se produire au niveau de l'os, de la dure-mère ou de la peau lors de l'accès au crâne. L'emplacement du trou de forage relève de la responsabilité du clinicien concerné.

Contre-indications

Ce dispositif ne doit être utilisé que pour l'indication spécifique indiquée.

Description

Le Delta Cranial Access Kit est un kit à usage unique qui contient tous les éléments nécessaires à l'accès crânien.

Le kit contient les composants suivants :

- Cire osseuse x 1
- Suture Ethilon x 1
- Stylo marqueur de peau, fin (avec règle) x 1
- Seringue, 10 ml-12 ml, LS, excentrique x 2
- Poignée Bard Parker avec lame n° 11 x 1
- Poignée Bard Parker avec lame n° 15 x 1
- Holzheimer Blunt x 1
- Perceuse à main jetable x 1
- Pince Mosquito, courbée x 2
- Suture Mersilk 3/8 Circle RC 26 mm, noir 2/0, 45 cm x 1
- Lame 10 - Lame Scalpel Acier au carbone n° 10 x 1
- Pince à baïonnette Gruenwald, pointe dentelée, longueur 8 pouces x 1
- Dissecteur Mac Donald, courbé, 185 mm (7 1/4"), double tranchant, émoussé X 1
- Chariot drapé/Housse de table 112 x 112 cm SMS Bleu
- Porte-aiguille Mayo, 16 cm x 1
- Pince à tissu Adson 12 cm x 1
- Pince à pansement Adson x 1
- Ciseaux à iris, 11 cm x 1
- Champ à fenêtre 60 x 50 cm x 1
- Bâton éponge x 1
- Serviette absorbante x 3

Avertissements

Lors du perçage, le foret doit être perpendiculaire au crâne. Faites très attention lorsque vous percez la dure-mère avec le poinçon pour dure-mère afin d'éviter d'endommager le parenchyme.

Précautions à prendre

Ne pas utiliser si : l'emballage ou le sceau semble endommagé, le contenu semble endommagé, ou la date de péremption est dépassée.

Ce produit est à usage unique et doit être jeté après usage. Une technique aseptique doit être respectée pendant la procédure.

Faites très attention lorsque vous ouvrez les instruments munis d'un couvercle de protection, car ils sont très tranchants.

Soyez prudent lorsque vous retirez les articles des plateaux et lorsque vous enlevez les embouts de protection.

Certains composants tels que la cire osseuse, les sutures, les boulons et les mèches, s'ils sont inclus, ont leur propre date de stérilité ; vérifiez qu'ils ne sont pas périmés avant de les utiliser.

Tous les instruments sont à usage unique. Ne pas restériliser ni réutiliser.



Instructions pour l'utilisation

Veillez lire avant l'utilisation

- Après avoir préparé et drapé le patient, pratiquer l'incision cutanée et la rétraction jusqu'au crâne.
- Avant l'utilisation, faire fonctionner l'appareil en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et vérifier que l'appareil fonctionne normalement.
- Desserrer le mandrin en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis insérer le foret sélectionné dans la fente du mandrin et s'assurer que le foret est correctement positionné.
- Fixer le foret en tournant le mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Tenir la poignée et la tourner, l'appareil commence à fonctionner.
- Une fois le travail terminé, arrêter la rotation de la poignée.
- Desserrer le foret en tournant le mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Retirer la mèche de la fente du mandrin.
- Fermer le site et s'habiller en conséquence

Informations supplémentaires

Contre-indication

s.o.

Durée de conservation

Voir l'étiquetage du produit.

Stockage et transport

Veillez à ce que le produit soit stocké dans un environnement propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Guide des symboles



Fabricant



Ne pas réutiliser



Code de lot 'Lori



Date de fabrication



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Numéro de nouvelle commande



Distributeur



Tenir à l'écart de la lumière du soleil



Autorisé Représentant dans la communauté européenne



Date limite de consommation



Garder au sec



marquage CEE

DELTA
Mode d'emploi

Cranial
Access Kit

+44 (0)1782 637009
sales@deltasurgical.co.uk