

Belangrijke informatie

Lees voor gebruik

STERILE EO

Indicaties

De Delta Cranial Access Kit is vereist wanneer een craniotomie nodig is voor ICP- of CSF-afvoerprocedures.

Bijwerkingen

Bloedingen kunnen optreden uit het bot, de dura of de huid tijdens het openen van de schedel. De locatie van het boorgat is de verantwoordelijkheid van de betrokken clinicus.

Contra-indicaties

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor de getoonde specifieke indicatie.

Omschrijving

De Delta Cranial Access Kit is een kit voor eenmalig gebruik die alle artikelen bevat die nodig zijn voor toegang tot de schedel.

De kit bevat de volgende componenten

- Bone Wax x 1
- Hechtdraad Ethilon x 1
- Huidmarkeerpen, fijn (met liniaal) x 1
- Spuit, 10m1-12m1, LS, Excentrisch x 2
- Bard Parker-handgreep met nr. 11-blad x 1
- Bard Parker-handgreep met nr. 15-blad x 1
- Holzheimer-retractor bot x 1
- Wegwerphandboor x 1
- Mosquitoklem, gebogen x 2
- Hechtdraad Mersilk 3/8 Cirkel RC 26mm, zwart 2/0, 45cm x 1
- Mes 10 - Mes Scalpel Koolstofstaal nr. 10 x 1
- Gruenwald-bajonetvormige extractietang, gekartelde punt, 8 inch lengte x 1
- Mac Donald-dissector, gebogen, 185 mm (7 1/4"), dubbelzijdig, bot/bot X 1
- Doekrolley/Tafelhoes 112 x 112cm SMS Blauw
- Mayo-naaldhouder, 16 cm x 1
- Adson-weefseltang 12 cm x 1
- Adson-verbandtang x 1
- Irisschaar, 11 cm x 1
- Gatdoek 60 x 50 cm x 1
- Sponsstok x 1
- Absorbere nde handdoek x 3

Waarschuwingen

Bij het boren moet de boor loodrecht op de schedel staan. Wees extra voorzichtig bij het perforeren van de dura met de durapons om schade aan het parenchym te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

Niet gebruiken als: de verpakking of verzegeling beschadigd lijkt, de inhoud beschadigd lijkt of de vervaldatum is verstreken.

Dit product is alleen voor eenmalig gebruik en moet na gebruik worden weggegooid. Tijdens de procedure moet een aseptische techniek worden gevolgd.

Wees extra voorzichtig bij het openen van de instrumenten met beschermkappen, c instrumenten zijn erg scherp.

Wees voorzichtig bij het verwijderen van items uit trays en bij het verwijderen van beschermende dopjes.

Sommige componenten zoals Bone Wax, hechtingen en bout en boor, indien inbegrepen, hebben hun eigen steriliteitsdatum, controleer of ze vóór gebruik niet zijn verlopen.

Alle instrumenten zijn alleen voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw steriliseren of hergebruiken.



Gebruiksaanwijzing *Lees voor gebruik*

- Nadat u de patiënt hebt voorbereid en gedrapeerd, voert u de huidincisie uit en trekt u zich terug naar de schedel.
- Bedien het apparaat voor gebruik door de hendel respectievelijk met de klok mee en tegen de klok in te draaien en controleer of het apparaat normaal kan werken.
- Draai de boorkop los door tegen de klok in te draaien en steek vervolgens de geselecteerde boor in de boorkopgleuf en zorg ervoor dat de boor goed is gepositioneerd.
- Bevestig de boor door de boorkop met de klok mee te draaien.
- Houd de greep vast en draai de hendel, het apparaat begint te werken.
- Zodra het werk is voltooid, stopt u met het draaien van de handgreep.
- Maak de boor los door de boorkop met de klok mee te draaien.
- Verwijder de boor uit de boorkopgleuf.
- Sluit de locatie en breng dienovereenkomstig verband aan

Aanvullende informatie

Contra-indicate

N.v.t.

Houdbaarheid

Zie productetikettering.

Opslag en transport

Zorg ervoor dat het product wordt bewaard in een schone, droge omgeving en uit direct zonlicht.

Symbolengids

 Manufacturer	 Niet hergebruiken	 Lori-partijcode
 Fabricagedatum	 Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	 Herbestellingsnummer
 Distributeur	 Houd uit de buurt van zonlicht	 Geautoriseerd Vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
 Te gebruiken tot	 Droog bewaren	 CE-markering

DELTA

Gebruiksaanwijzing

**Cranial
Access Kit**

 +44 (0)1782 637009
 sales@deltasurgical.co.uk

Het gebruik van deze kit is strikt beperkt tot ervaren en gekwalificeerde klinici